

Návod k použití

1. Vyberte správný typ tamponu s přihlédnutím k místu aplikace, velikosti rány a typu lékařského postupu, pro který bude použit.
2. Před použitím zkontrolujte obal, zda není poškozený
3. Otevřete obal jednotky a vyjměte sterilní tampon
4. Zajistěte, aby produkt nebyl kontaminován nebo poškozen
5. Aplikujte v místě chirurgického zákroku nebo přímo na kůži nebo ránu, pokud se používá jako obvaz na ránu, měl by tampon přesahovat okraje rány o cca. 2 cm, aby bylo možné ti upevnit na nezraněnou pokožku
6. Tampon neobsahuje adhezivní vrstvu a je třeba jej zafixovat lepicí páskou, netkanou lepicí páskou, polyuretanovým filmem, obvazem nebo síťovým obvazem.
7. Četnost výměny obvazu by měla záviset na množství exsudátu přicházejícího z rány, rozsahu, v jakém obvaz nasákl, a příslušných lékařských postupech pro obvaz rány
8. Aplikační strana musí být zkontrolován, zda neobsahuje jakékoli komplikace nebo znečištění, které mohou být indikovány horečkou, bolestí, zarudnutím a otoky. V případě infekce odstraňte obvaz, zkontrolujte místo aplikace a proveďte další rozhodnutí o léčbě
9. Pokud je obvaz poškozený nebo znečištěný, vyměňte tampon za nový
10. Po použití zlikvidujte produkt v souladu s platnými zákony nebo obvyklými postupy jednotky.

Doporučené skladování:

Na suchém místě v teplotním rozmezí 5 – 40°C

Výrobce:

ZARYS International Group sp. z.o.o. sp.k.

Pod Borem 18

Zabrze 41-808, Polsko

www.zarys.com

Distributor:

CB MEDICAL s.r.o.

U Bechyňské dráhy 790/3

Tábor 390 02

www.cbmedical.cz