

Návod k použití respirátorů FFP2 NR zn GEN YUAN TANG, typ: FQ66

1. Před vybalením respirátoru z obalu si pečlivě umyjte ruce mýdlem a vodou (můžete si je vydezinfikovat).
2. Vybalte masku ze sáčku a umístěte si na obličej tak, aby dostatečně doléhala k Vaší tváři. Zajistěte, aby překrývala nos i bradu (nesterilní výrobek).
3. Gumičky natáhněte za uši tak, aby respirátor stále dostatečně přiléhál k Vaší tváři. Případně si gumičky upravte.
4. Respirátor sundávejte opatrně a pouze za gumičky.
5. Použitý respirátor vložte do sáčku a vyhoďte ho.
6. Po sundání respirátoru si umyjte ruce mýdlem a vodou (můžete si ruce vydezinfikovat).



Respirátor FFP2 NR typ FQ66 je 5 vrstvý respirátor s těmito vrstvami:

- Netkaná textilie pro filtraci prachu
- Dvojitý elektrostatický filtrační meltblow
- Antialergický vatelín
- K pokožce šetrná hypoalergenní netkaná textilie

Respirátor je určen pro jednorázové použití. Vnitřní lícnicová vrstva je hypoalergenní a příjemná při nošení. Vnější lícnicová vrstva z netkané textilie zajišťuje účinnou filtraci prachových částic. Vnitřní dvě elektrostatické filtrační meltblow vrstvy zajišťují filtraci $\geq 95\%$ jako účinná ochrana před viry, bakteriemi, prachem a kapénkami.

Respirátor má univerzální velikost, je vybaven vlisovaným tvarovatelným drátkem s tvarovou pamětí pro utěsnění respirátoru kolem nosu a upínacími gumičkami na fixaci za uši nebo na temeni hlavy (při použití plastové spony pro volitelnou fixaci).

Účel použití: Respirátor GEN YUAN TANG, typ FQ66 slouží k ochraně dýchacích orgánů uživatele proti pevným a kapalným aerosolům. Výrobek splňuje požadavky pro zařazení do třídy FFP2. Určeným účelem je zakrytí úst a nosu uživatele, aby se minimalizoval přímý přenos infekčních částic mezi uživatelem a osobami v jeho okolí (včetně pacientů). Respirátor dále slouží i k ochraně uživatele filtrací vdechovaného vzduchu s celkovou účinností převyšující 95%.

Bezpečnostní upozornění: Před použitím zkontrolujte, zda není respirátor poškozený. Používejte pouze v dostatečně větraných prostorech. Uživatel (v rámci OOP zaměstnanec) musí být před použitím tohoto ochranného prostředku proškolen zaměstnavatelem o správném používání v souladu s platnými bezpečnostními normami a standardy ochrany zdraví. Při nasazování respirátoru na obličej postupujte dle návodu. Respirátor je určen k jednorázovému použití. Maximální účinnost respirátoru je 8 hodin od otevření originálního obalu. Doba použitelnosti se může zkracovat vlivem okolního prostředí, namáhavosti prostředku a mechanickými vlivy.




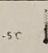
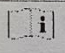

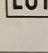


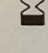

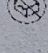
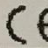
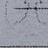
Nepoužívejte respirátor v kontaminované oblasti za těchto okolností:

1. Atmosféra obsahuje méně než 19,5% kyslíku
2. K ochranně proti plynům nebo páram znečišťujícím látky nebo jejich koncentrace jsou-li neznámé nebo bezprostředně nebezpečné pro život nebo zdraví
3. Koncentrace znečišťujících látek překračují maximální koncentrace použití dle platných OSHA standardů nebo omezení dle platných vládních předpisů
4. Použití ve výbušném prostředí

Nepoužívejte respirátor s vousy na tváři nebo za jiných podmínek, které mohou zabránit dokonalé těsnosti.

Kontrola těsnosti:

1. Pro vyzkoušení správného těsnění respirátoru, položte obě ruce na respirátor a ostře vydechněte.
2. Sejměte respirátor okamžitě v případě problematického dýchání, nebo při jeho poškození či zdeformování!
3. Nepoužívejte respirátor v případě, že nemůžete dosáhnout řádného utěsnění
4. Pečlivé dodržování těchto pokynů je důležitým krokem pro bezpečné používání respirátoru

	Nepoužívejte opakovaně		Nesterilní		Udržujte v suchu
	Skladujte při -5-50 °C		Viz návod k použití		Výrobce
	Číslo šarže		Ochrana dýchacích cest		Datum výroby
	Datum spotřeby		Použitý obal vyhod'te do příslušné nádoby na odpad		Nepoužívejte, pokud je obal poškozen
	Výrobek odpovídá příslušným směrnícím a je certifikován 2163				Prodyšné

Dokumentace: <https://eshop.cbmedical.cz/respirator-ffp2-nr-bily/> (sekce detailní popis produktu – dokumenty)

Skladování: skladujte při teplotách -5 °C až +50 °C a v suchém prostředí

Expirace: Za dodržení skladovacích podmínek 3 roky od data výroby. Informace je vždy uvedena na obalu (bal./6ks). Pro kusový prodej je datum výroby 20/12/2020 a expirace 20/12/2023.

Splňující normy: EU 2016/425, EN 149:2001 + A1:2009

EU prohlášení o shodě: CE2163 číslo: 2163-PPE-950

Oznámené subjekty, které jsou zapojeny do posuzování shody OOP:

UNIVERSAL CERTIFICATION (NB 2163), Necip Fazil Bulvan Keyap Sitesi E2 Blok No.: 44/84, Yukan Dudullu Ümraniye – Istanbul – Turecko, tel.: +90 216 455 80 80

UNIVERSAL UYGUNLUK DEGERLENDİRME HİZMETLERİ VE TIC. A.Ş., Tatlısu Mahallesi Arif Ay Sokak No.: 16, Ümraniye Istanbul – Turecko, tel.: +90 532 755 90 01, +90 216 455 80 80, inforiversalcert.com, www.universalcert.com

Dovozce do EU: AMA ESTINTORI SRL, Via del Biancospino 1, 50013 Campi Bisenzio, Itálie

Distributor EU: LUND18Electro, Martinstr. 10b, 73728 Esslingen, Německo

Distributor ČR: CB Medical, s.r.o., U Bechyňské dráhy 790/3, 390 02 Tábor, Česká republika, obchod@cbmedical.cz

Výrobce: Zhejiang Gen Yuan Tang Medical Technology Co., Ltd., No. 1278-1308 Wanxiang Road, Wanguan Town, Pingyang County, Wenzhou, Zhejiang, Čína.

CB Medical s.r.o.

U Bechyňské dráhy 790/3
390 02, Tábor

IČ: 10812199

DIČ: CZ10812199

Tel.: (+420) 725 111 278

Email: obchod@cbmedical.cz