



Informace o použití nitrilových ochranných, vyšetřovacích a zdravotnických rukavic bez pudření zn. SETINO:

Tento výrobek je osobní ochranná pomůcka kategorie III. podle směrnice (EU) 2016/425. Splňující normy EN374-1, EN374-2, EN374-4EN374-5 a EN420. Certifikace shody OOP CE2777.

Výrobek je zdravotním prostředkem dle standardizace MDR 2017/745 EU, 93/42/EEC kategorie I. Splňující normy EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4 pod klasifikačním kódem 11-882. Testováno dle standartu EN ISO 374-5:2016 a EN ISO 374-1:2016/typ B. Splňující normu ASTM D6978 pro styk s léčivými při chemoterapii.

TÜV certifikát ISO 9001:2016, EN ISO 13485:2016.

Použití: Nitrilové vyšetřovací rukavice jsou určeny k ochraně před viry, bakteriemi, tekutinami. Pro maximální bezpečnost doporučujeme jednorázové použití. Nitril jako výrobní materiál přináší komfort pro uživatele, neobsahuje latexové proteiny (způsobující alergické reakce) snižuje únavu rukou. Před použitím zkontrolujte rukavice z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlenou činnost, oblasti použití a související rizika. Vyberte vhodnou velikost pro Vaše ruce. Velikost rukavic se může lišit v důsledku roztažení. Před použitím a také po nasazení rukavic zkontrolujte, zda nedošlo k poškození a nikdy nepoužívejte nevhodné nebo poškozené rukavice! Rukavice jsou určeny pro jedno použití a měly by být pravidelně měněny. Uvedením stupně ochrany nelze učinit žádné prohlášení o skutečné době ochrany na pracovišti, protože použitelnost ovlivňují další faktory, jako například: teploty, oděr nebo koncentrace chemikálií. Tyto rukavice neposkytují ochranu proti ohni, horku, chladu, elektrickému proudu, ionizujícímu záření nebo mechanickému nebezpečí. Při sundávání se nedotýkejte kontaminovaných míst rukavic.

Zvláštní pokyny: Odolnost proti chemikáliím byla testována v laboratorních podmínkách pouze na dlani a vztahuje se pouze na testované chemikálie při uvedených koncentracích. Odolnost se může lišit pro různé chemické koncentrace. Úroveň degradace signalizují změny odolnosti rukavice při styku s testovanou chemikálií. Ochranný účinek rukavic proti mikroorganismům, jako jsou bakterie, houby a viry, byl testován v laboratorních podmínkách. Při použití může ochranný účinek výrazně poklesnout vlivem mechanického opotřebení, jako např. při pohybu, zaseknutí, oděru nebo chemickém rozkladu. V případě korozivních chemikálií je rozklad nejdůležitějším faktorem při výběru chemické ochranné rukavice. Rukavice mohou u citlivých lidí způsobit alergické reakce. Zvláštní opatrnost se doporučuje v případě známé přecitlivělosti. Ochranné rukavice by se neměly nosit pokud existuje nebezpečí zachycení v rotujících součástech stroje.

Skladování: Rukavice musí být skladovány správně, tj. v krabicích v chladných a suchých místnostech. Teplu, vlhkosti a přímému slunečnímu světlu se musíte vyhnout! Skladujte při teplotách od +5°C do max. +35°C.

Doba použitelnosti (expirace): Rukavice jsou trvanlivé za uvedených podmínek 3 roky po datu výroby. Doby expirací jsou vždy uvedeny na obalu.

Likvidace: Likvidace podle platných předpisů o odpadech. Chemicky kontaminované rukavice by měly být likvidovány v souladu s předpisy o příslušných chemických látkách.

Distributor pro ČR: CB Medical s.r.o., Pod Kozím hrádkem 635 , 391 56, Tábor

Distributor pro EU: SETINO Hungary Kft., Száva 4/B, 1107, Budapešť, Maďarsko.

Výrobce: Shijiazhuang Hongray Group Co., Ltd., South Tongda Rd., East Dist. Jinzhou, 052260, Hebei, Čína.

CB MEDICAL, s.r.o.

Pod Kozím hrádkem 635
391 56, Tábor

IČ: 10812199
DIČ: CZ10812199

Tel: (+420) 777 784 535

Email: obchod@cbmedical.cz
<https://eshop.cbmedical.cz>

Společnost je vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 30995