



Informace o použití vinyl/nitril blend ochranných, vyšetřovacích a zdravotnických rukavic SETINO:

Tento výrobek na směsné bázi vinylu a nitrilu. Tento výrobek je osobní ochranná pomůcka kategorie III podle směrnice (EU) 2016/425. Splňující normy EN 455. Testováno dle standartu EN ISO 374-5:2016 a EN ISO 374-1:2016. TÜV certifikát EN ISO 13485:2016.

Použití: Před použitím zkontrolujte rukavice z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlenou činnost, oblasti použití a související rizika. Vyberte vhodnou velikost pro Vaše ruce. Velikost rukavic se může lišit v důsledku roztažení. Před použitím a také po nasazení rukavic zkontrolujte, zda nedošlo k poškození a nikdy nepoužívejte nevhodné nebo poškozené rukavice! Rukavice jsou určeny pro jedno použití a měly by být pravidelně měněny. Uvedením stupně ochrany nelze učinit žádné prohlášení o skutečné době ochrany na pracovišti, protože použitelnost ovlivňují další faktory, jako například: teploty, oděr nebo koncentrace chemikálií. Tyto rukavice neposkytují ochranu proti ohni, horku, chladu, elektrickému proudu, ionizujícímu záření nebo mechanickému nebezpečí. Při sundávání se nedotýkejte kontaminovaných míst rukavic.

Zvláštní pokyny: Odolnost proti chemikáliím byla testována v laboratorních podmínkách pouze na dlani a vztahuje se pouze na testované chemikálie při uvedených koncentracích. Odolnost se může lišit pro různé chemické koncentrace. Úrovně degradace signalizují změnu odolnosti rukavice při styku s testovanou chemikálií. Ochranný účinek rukavic proti mikroorganismům, jako jsou bakterie, houby a viry, byl testován v laboratorních podmínkách. Při použití může ochranný účinek výrazně poklesnout vlivem mechanického opotřebení, jako např. při pohybu, zaseknutí, oděru nebo chemickém rozkladu. V případě korozivních chemikálií je rozklad nejdůležitějším faktorem při výběru chemické ochranné rukavice. Rukavice mohou u citlivých lidí způsobit alergické reakce. Zvláštní opatrnost se doporučuje v případě známé přecitlivělosti. Ochranné rukavice by se neměly nosit pokud existuje nebezpečí zachycení v rotujících součástech stroje.

Skladování: Rukavice musí být skladovány správně, tj. v krabicích v chladných a suchých místnostech. Teplu, vlhkosti a přímému slunečnímu světlu se musíte vyhnout! Skladujte při teplotách od +5°C do max. +35°C.

Doba použitelnosti (expirace): Rukavice jsou trvanlivé za uvedených podmínek 3 roky po datu výroby. Doby expirací jsou vždy uvedeny na obalu.

Likvidace: Likvidace podle platných předpisů o odpadech. Chemicky kontaminované rukavice by měly být likvidovány v souladu s předpisy o příslušných chemických látkách.

Distributor pro EU: SETINO Hungary Kft., Száva 4/B, 1107, Budapešť, Maďarsko.

Výrobce: Shijiazhuang Hongray Group Co., Ltd., South Tongda Rd., East Dist. Jinzhou, 052260, Hebei, Čína.

CB MEDICAL, s.r.o.

Pod Kozím hrádkem 635
391 56, Tábor

IČ: 10812199
DIČ: CZ10812199

Tel: (+420) 777 784 535

Email: obchod@cbmedical.cz
<https://eshop.cbmedical.cz>

Společnost je vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 30995