

Katetr Foley latexový



Nelaton

20 840 Ch12, 20 841 Ch14, 20 842 Ch16, 20 843 Ch18, 20 844 Ch20, 20 845 Ch22,
20 846 Ch24

Tiemann

20 858 Ch12, 20 856 Ch14, 20 852 Ch16, 20 853 Ch18, 20 854 Ch20, 20 855 Ch22,
20 857 Ch24

Popis

Všechny katetry jsou vybaveny dvojitým lumenem, proximálním trychtýřovitým rozšířením, ventilem k nafukování a distálně umístěným zadržovacím balonkem a špičkami různých typů. Plnicí objemy balonku jsou udány v mililitrech a průměr katétru je udáván na Charriérově stupnici (Ch.) a je vyznačen na každém jednotlivém katétru, na štítku každého obalu a na každé krabici. Typ distální špičky je vyznačen na každém balení a na každé krabici.

Rozmezí velikostí

12 Ch. – 24 Ch.

Indikace

Tyto katetry jsou určeny k běžné drenáži močového měchýře nebo k běžné pooperační drenáži a napuštění močového měchýře. Před použitím si důkladně přečtěte veškeré instrukce.

Příprava k použití

Vyjměte katetr ze sterilního obalu za dodržení pravidel asepse. Vizuálně zkontrolujte katetr, zda není poškozen. Pokud provádíte zkušební naplnění balonku, ujistěte se, že je balonek prázdný, než ho zavedete do těla pacienta. K plnění balonku by měla být používána výhradně sterilizovaná voda.

Návod k použití

Navlhčete katetr za použití lubrikantu nebo gelu na vodní bázi (dle potřeby s nebo bez lokálního anestetika). Katetr zaveďte do urethry tak daleko, aby se balonek s jistotou nacházel v močovém měchýři, přičemž dodržujte všechna pravidla asepse popsána v publikacích. Všechny zahnuté špičky mají zahnutí na stejné straně katétru jako plnicí ventil. K naplnění balonku je možné použít stříkačku s koncovkou Luer. Balonek naplňte sterilizovanou vodou. S některými produkty je dodávána předplněná

CB Medical s.r.o.
U Bechyňské dráhy 790/3
390 05 Tábor
Tel: (+420) 725 111 278
Email: obchod@cbmedical.cz
www.cbmedical.cz



sterilní stříkačka. Objem balonku je vyznačen na trychtýřovitém rozšíření katétru a/nebo na štítku balení.

Upozornění

Určeno pouze pro použití v urologii. Tyto výrobky jsou pouze na jedno použití

Způsob balení

Každý výrobek je dodáván v samostatném sterilním obalu. Pokud není obal poškozený nebo otevřený, je výrobek sterilní. Výrobek je určen na jedno použití. Nepoužívejte ho opětovně a nepokoušejte se ho resterilizovat. Opětovné použití může mít za důsledek infekci a/nebo nespolehlivost výrobku.

Skladování

Neskladujte ve vlhku a při extrémních teplotách.

Výrobce

Ningbo Pinmed Instruments Co.,Ltd.
Room (22-1) (22-2), No.455, East Zhongshan Road, Jiangdong District, 315040 Ningbo,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

EC reprezentant

Lotus Global Co., Ltd.
1 Four Seasons Terrace West Drayton, Middlesex London, UB7 9GG United Kingdom

Dovozce do ČR

Black Storm s.r.o., Pod vrstevnicí 1529/18, 140 00 Praha 4

Distributor v ČR

CB Medical s.r.o., U Bechyňské dráhy 790/3, 390 05 Tábor

Datum poslední revize 6. 12. 2019