



Sběrný sáček močový 2000ml. / 90cm. / sterilní

- 1) Lékařský prostředek, který je určen pro denní externí odběr moči a jiných tělesných tekutin
- 2) Před použitím se ujistěte, že obal není poškozen, pokud ano, tak sáček nepoužívejte.
- 3) Otevřete obal a vyjměte močový sáček
- 4) Před připojením urologického katetru k močovému sáčku se ujistěte, že je ventil močového sáčku uzavřen
- 5) Odstraňte modrý ochranný čep z připojení
- 6) Při zachování aseptického principu přitlačte urologický katetr k močovému sáčku, aby jste se připojili, zkontrolujte těsnost spojení
- 7) Upevněte močový sáček na věšák nebo rám u postele
- 8) Pokud je močový sáček naplněn, uzavřete ventil a močový sáček vyměňte
- 9) Použitý močový sáček odpojený od urologického katetru likvidujte, jako infekční lékařský odpad

Skladování:

- při teplotách od 5°C do 40°C
- udržujte mimo přímé sluneční světlo
- skladujte v suchu
- rozsah vlhkosti v okolí při skladování je 30% až 80%

Výrobce: ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808, Zabrze, Polsko,
www.zarys.com.pl

Distributor: CB Medical, s.r.o., U Bechyňské dráhy 790/3, 390 02, Tábor, Tel.: +420 777 784 535,
www.cbmedical.cz

CB MEDICAL, s.r.o.

U Bechyňské dráhy 790/3
390 02 Tábor

IČ: 10812199

DIČ: CZ10812199

Tel.: +420 777 784 535

Email.: obchod@cbmedical.cz

<https://eshop.cbmedical.cz>

Společnost je vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 30995